



B 09  
B/7098



**Sida Info Service**

**05 36 66 36**

Appel anonyme et gratuit 24h sur 24h et 7 jours sur 7

Centre Régional d'Information  
et de Prévention du Sida  
Provence - Alpes - Côte d'Azur

**CRIPS**

Marseille 91 38 16 00

Nice 92 03 56 21

**Région**  
Provence-Alpes  
Côte d'Azur

R.02712 B

Le préservatif doit être placé sur le pénis en érection avant tout contact entre le pénis et le corps du partenaire afin d'aider à prévenir toute maladie sexuellement transmissible. Il est nécessaire d'éviter l'utilisation de lubrifiants huileux tels que gelées à base de pétrole et huile pour bébé. Consulter un médecin ou un pharmacien en ce qui concerne la compatibilité des préservatifs prescrits avec les remèdes vendus librement et destinés à être appliqués dans le vagin ou sur le pénis.

## PRÉSERVATIF HOPLITE GRAND CLASSIC

Conforme à la norme NF S 97-031 \* Incolore \*  
 Classe 1 - Type A/surface lisse \* Avec réservoir \*  
 Lubrifié (lubrifiant : POLYALKYL SILOXANE) \*  
 Contrôlé électroniquement \*

Distribué par TERPAN  
 78125 ÉMANCÉ - FRANCE \* (1) 34 94 01 40 \*

STOCKER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE  
 DIRECTE DU SOLEIL ET DE L'OZONE \*

Mode d'emploi à l'intérieur de l'emballage.

N° de lot et date limite d'utilisation sur l'enveloppe du préservatif

Modèle déposé

1



Ouvrir l'emballage  
 à la main (ne pas utiliser  
 d'objets tranchants : ciseaux,  
 couteau, ...).  
 Attention à ne pas abîmer le  
 préservatif avec les ongles.



2



3



Dérouler le préservatif  
 jusqu'à la base du sexe en  
 érection.

Appliquer  
 le préservatif sur le gland  
 découvert en pinçant le  
 réservoir au bout du  
 préservatif pour en chasser  
 l'air.

5



Jeter le préservatif usagé à la poubelle après  
 l'avoir noué. Ne jamais réutiliser le préservatif  
 Pour chaque rapport, utiliser un nouveau  
 préservatif.

4



Dès la fin du rapport  
 (éjaculation) et avant la fin  
 de l'érection, se retirer en  
 maintenant le préservatif à sa base.

